

Boston XO₂ und Boston XO sind offiziell indiziert bei Erkrankungen der Augeneroberfläche und trockenem Auge.

BAUSCH + LOMB

Boston[®]
Materials


EINSETZEN UND ENTFERNEN VON SKLERALLINSEN DREI-FINGER-METHODE

Bitte handhaben Sie Ihre Kontaktlinsen immer mit sauberen Händen. Ein Spiegel und ein sauberes Handtuch als Unterlage können hilfreich sein. Beginnen Sie immer mit dem gleichen Auge, um Verwechslungen zu vermeiden.


SKLERALLINSEN EINSETZEN



Spülen Sie die Linse mit einer konservierungsmittelfreien Kochsalzlösung.

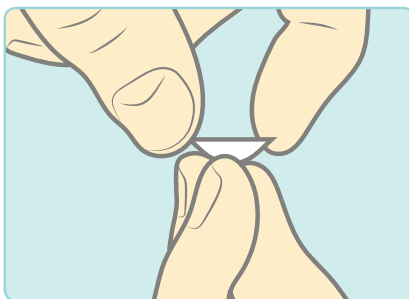


Zentrieren Sie die Linse auf Daumen, Zeige- und Mittelfinger.

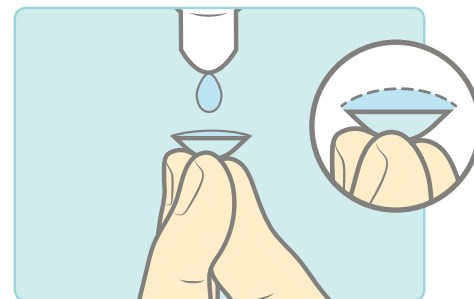


Füllen Sie die Linse bis kurz vor dem Überlaufen (Oberflächenspannung).



Beugen Sie sich vor und schauen Sie gerade nach unten. Öffnen Sie die Augenlider weit und setzen Sie die Linse mittig auf Ihr Auge.

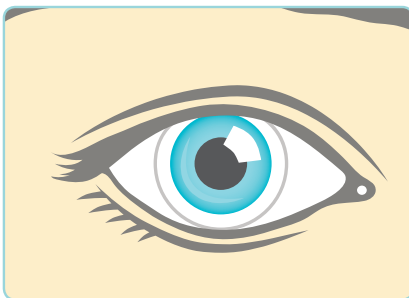


Blinzeln Sie. Tupfen Sie die überschüssige Flüssigkeit ab. Stellen Sie sicher, dass die Linse zentriert ist und bequem sitzt.

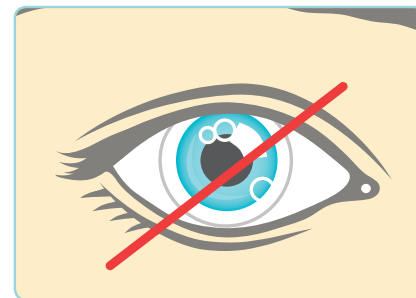


Luftblasen können Unbehagen, Sehstörungen und ungewöhnliche Lichteffekte verursachen. Falls Luftblasen vorhanden sind, setzen Sie die Linse erneut ein.


SKLERALLINSEN ENTFERNEN (Anleitung mit Sauger – siehe Rückseite)

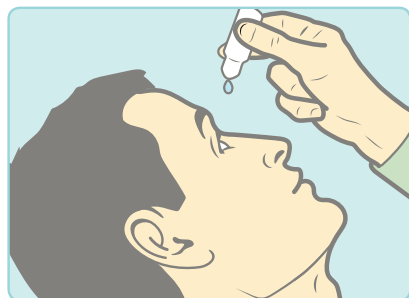

Benetzen Sie das Auge mit 1 – 2 Tropfen, um die Linse zu lösen.

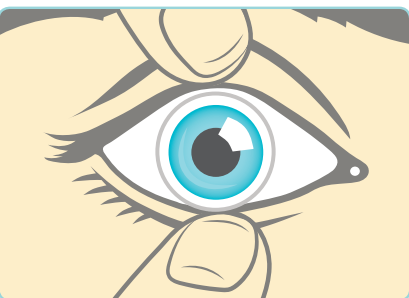

Ziehen Sie Ihr unteres Augenlid nach unten und schieben es dann nach oben unter den unteren Rand der Linse. Drücken Sie dann das Lid nach oben, um die Linse zu lösen.

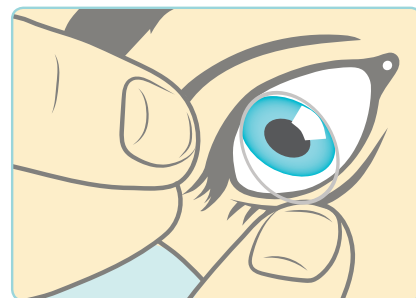

Heben Sie mit der anderen Hand den Rand der Linse an, um diese zu entfernen, während Sie sich über ein Handtuch beugen.

Besuchen Sie fit-boston.eu für weitere Informationen.

® = Trademark of Bausch + Lomb Incorporated or its affiliates.

**Gesunde Augen sind ein Geschenk.
Passen Sie darauf auf.**

BAUSCH+LOMB

Boston®
Materials


EINSETZEN UND ENTFERNEN VON SKLERALLINSEN SAUGERMETHODE

Bitte handhaben Sie Ihre Kontaktlinsen immer mit sauberen Händen. Ein Spiegel und ein sauberes Handtuch als Unterlage können hilfreich sein. Beginnen Sie immer mit dem gleichen Auge, um Verwechslungen zu vermeiden.


SKLERALLINSEN EINSETZEN




Spülen Sie die Linse mit einer konservierungsmittelfreien Kochsalzlösung.

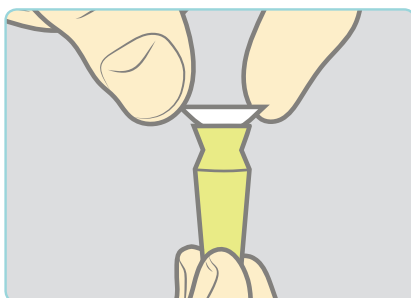


Setzen Sie die Linse auf die Mitte des Saugers.

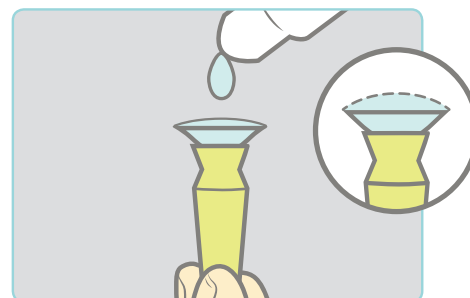


Füllen Sie die Linse bis kurz vor dem Überlaufen (Oberflächenspannung).

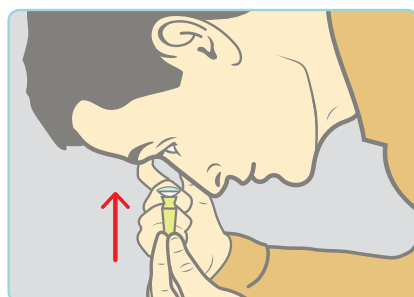

Beugen Sie sich vor und schauen Sie gerade nach unten. Öffnen Sie die Augenlider weit und setzen Sie die Linse mittig auf Ihr Auge.

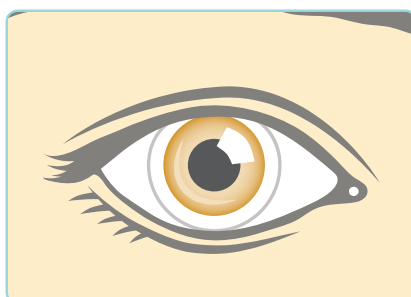


Blinzeln Sie. Tupfen Sie die überschüssige Flüssigkeit ab. Stellen Sie sicher, dass die Linse zentriert ist und bequem sitzt.

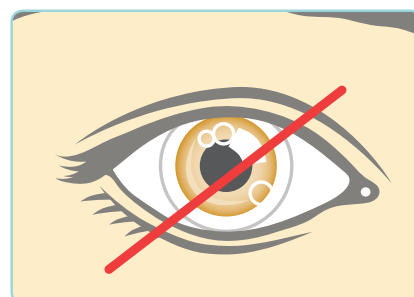


Luftblasen können Unbehagen, Sehstörungen und ungewöhnliche Lichteffekte verursachen. Falls Luftblasen vorhanden sind, setzen Sie die Linse erneut ein.


SKLERALLINSEN ENTFERNEN

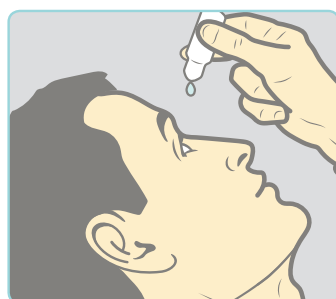


Benetzen Sie das Auge mit 1 - 2 Tropfen, um die Linse zu lösen.

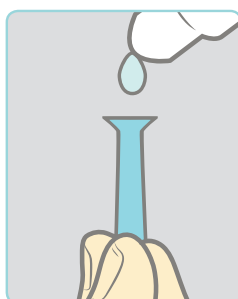

Benetzen Sie den Sauger mit 1 - 2 Tropfen.

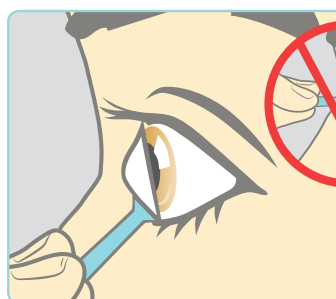

Setzen Sie den Sauger vorsichtig an den Rand (NICHT in die Mitte) der Linse.

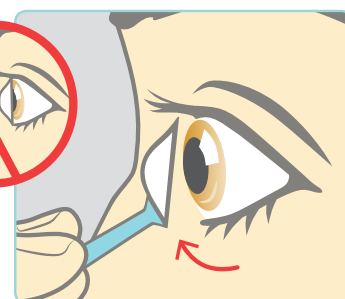

Kippen Sie die Linse vorsichtig nach oben außen und entfernen Sie sie vorsichtig von Ihrem Auge.

BAUSCH+LOMB

Wintergasse 32
69469 Weinheim, Germany

Susanne Krostitz

Tel.: +49 6201 17869
susanne.krostitz@bausch.com

Tanja Malkus

Tel.: +49 171 8158113
tanja.malkus@bausch.com